

eROCCA



echo 300



Manuel de l'utilisateur echo 300

pour echo 300 version 1.01

AVERTISSEMENTS

Les illustrations utilisées sur l'emballage d'écho 300 sont des vues d'artiste non contractuelles. Les fonctions ou accessoires peuvent changer.

Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la garantie d'écho 300.

Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez tout le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant utilisation.

SOMMAIRE

1	Vue d'ensemble	5
1.1	Présentation	5
1.2	Contenu.....	5
1.2.1	Accessoires livrés avec echo 300.....	5
1.2.2	Accessoires optionnels	6
1.3	Face avant	6
1.4	Tranche droite	7
1.5	Face arrière.....	7
2	Première mise en marche	8
3	Mise en marche / arrêt / veille.....	8
4	Recharger echo 300.....	10
5	Menu principal	11
5.1	Menu principal	11
5.2	Icônes du menu principal.....	12
6	Cahier de communication	13
6.1	Présentation	13
6.2	Gestion de la corbeille.....	14
6.3	Utiliser les icônes pour s'exprimer	14
6.4	Utiliser un scénario de vie.....	15
7	Clavier	16
7.1	Saisir un message	16
7.2	Enregistrer une phrase.....	17
7.3	Utiliser une phrase déjà enregistrée	18
7.4	Système de prédiction de mots.....	18
8	Téléphoner avec echo 300 (version beta)	19
8.1	Présentation	19
8.2	Utilisation	21
8.2.1	Appeler avec echo 300	21
8.2.2	Communiquer pendant un appel téléphonique.....	21
8.2.3	Raccrocher	21
8.2.4	Recevoir un appel.....	22
9	Paramétrage d'echo 300.....	23

9.1	Configuration simple.....	23
9.2	Configuration avancée.....	24
9.2.1	Audio	24
9.2.2	Phrase.....	25
9.2.3	Energie.....	26
9.2.4	Profil	27
9.2.5	Réseau, WIFI.....	28
9.2.6	Téléphonie – version BETA.....	28
9.2.7	Menu.....	29
10	Mise en garde/avertissements	30
	Câbles et accessoires.....	30
	Câbles et accessoires eROCCA.....	30
	Connexions	30
	Communication sans fil	30
11	Garantie	31
	Précautions d'utilisation et recyclage	31
	Précautions d'utilisation.....	31
	Transport et manipulation d'écho 300.....	31
	Température	31
	Appels d'urgence.....	31
	Interférence radio	32
	Exposition énergétique radio	32
	Atmosphères explosives	33
	Nettoyage de l'extérieur de echo 300	33
	Batterie d'écho 300	33
	Recharge de la batterie	33
	Mise au rebut et recyclage d'écho 300 et des accessoires (Union Européenne)	34
	Logos et marques	35
12	Support et échange avec eROCCA.....	36

1 VUE D'ENSEMBLE

1.1 PRESENTATION

echo 300 est un outil d'aide à la communication. Il permet de s'exprimer par le biais d'une synthèse vocale de haute qualité.

Certaines fonctionnalités apparaissent en grisé, il s'agit de fonctionnalités prévues pour la prochaine version logicielle qui, sera enrichie par vos retours et suggestions (voir chapitre 12). Ces fonctionnalités seront suivies de ce symbole :



1.2 CONTENU

1.2.1 Accessoires livrés avec echo 300

Contenu :

- echo 300
- Un chargeur
- Un câble USB
- Un manuel utilisateur




1.2.2 Accessoires optionnels

Peuvent être fournis sur demande avec echo 300 :


- Un câble pour les contacteurs
- Un chargeur pour l'Amérique du Nord
- Différents contacteurs
- Un flexible de fixation
- Un stylet capacitif




1.3 FACE AVANT

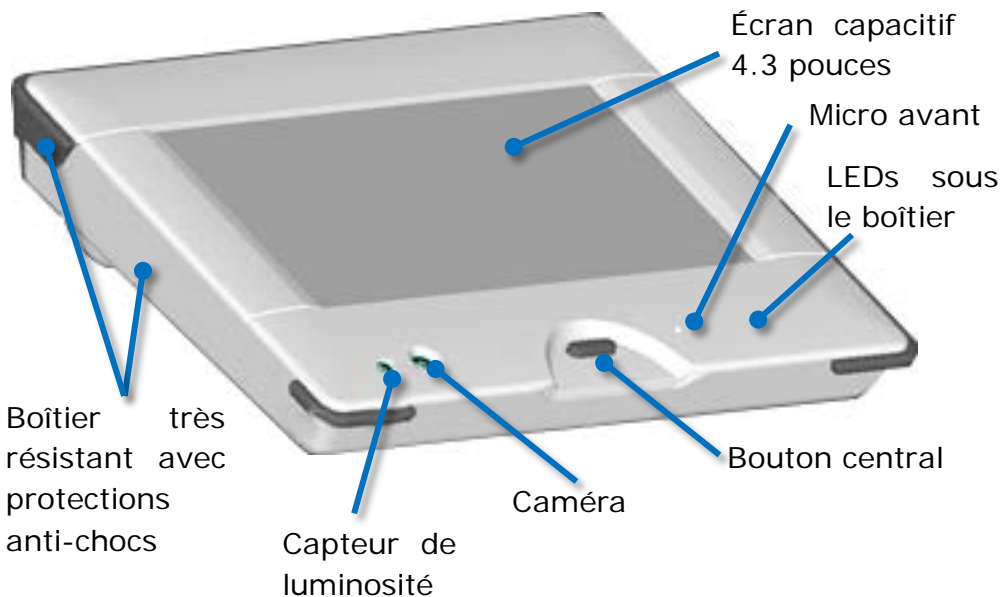

1.4 TRANCHE DROITE

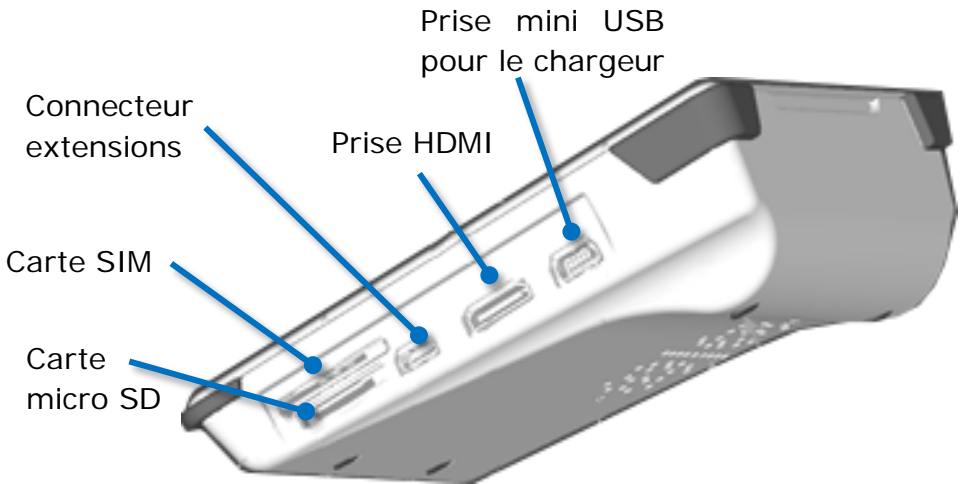


1.5 FACE ARRIERE

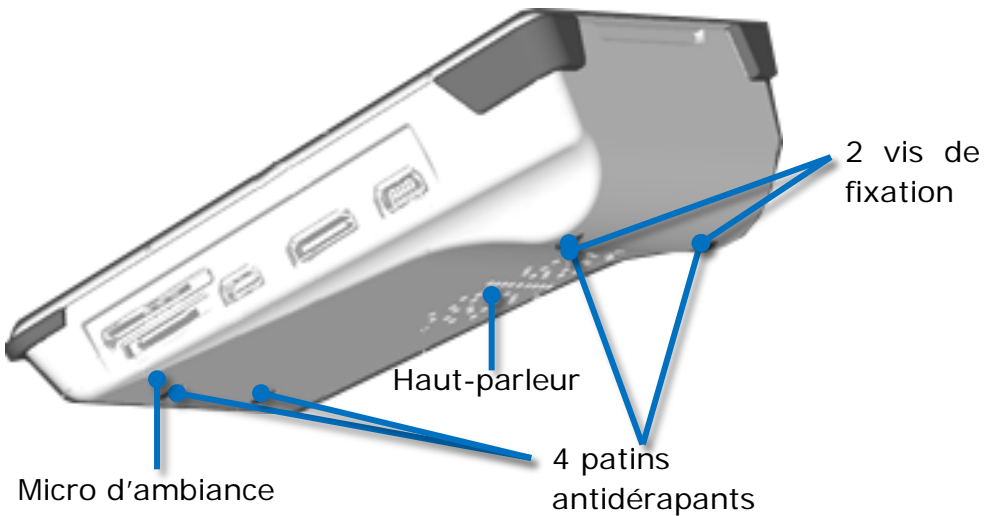

Système de fixation compatible avec sangles ou vis.

2 PREMIERE MISE EN MARCHE

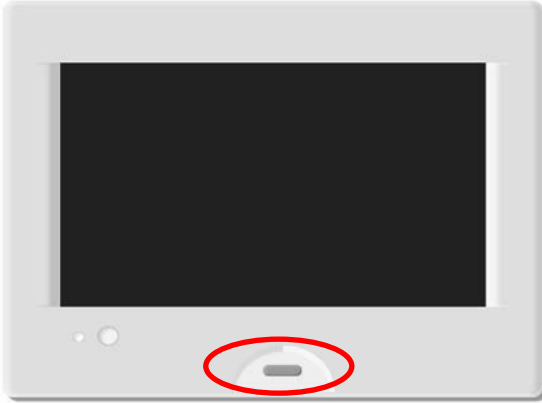

1 - appuyer une seconde sur le bouton central et relâcher. echo 300 vibre et l'écran noir devient blanc.

2 – le logo apparaît et echo 300 se lance. Patienter jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.



L'appareil ne nécessite pas de chargement préalable.

3 MISE EN MARCHE / ARRET / VEILLE

Allumer l'appareil : appuyer une fois sur le bouton central et attendre l'apparition du menu principal.


Mettre en veille : appuyer une fois sur le bouton central à partir du menu principal, l'écran s'éteint. En veille, echo 300 consomme peu d'énergie.



Pour **sortir de veille** :

- appuyer brièvement sur le bouton central ;
- appuyer sur le contacteur principal (accessoire optionnel) ;
- brancher le câble USB à l'appareil, il sort automatiquement de l'état de veille.

Arrêter l'appareil : à partir du menu principal, appuyez sur le bouton central jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous.

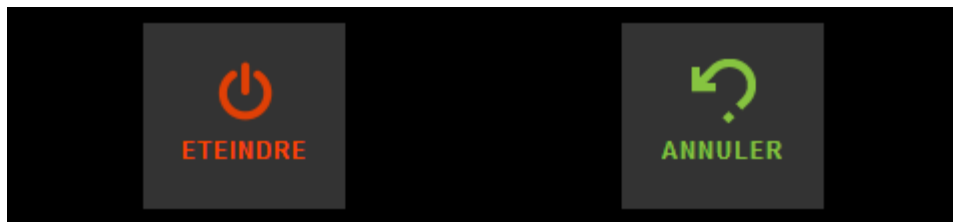

echo 300 ne consomme pas d'énergie lorsqu'il est éteint.

Réinitialisation : un appui prolongé (10 à 15 sec) réinitialise l'appareil. Pour rallumer, mettre echo 300 en charge (voir chapitre 4).

Aucune donnée utilisateur n'est perdue lors d'une réinitialisation.

4 RECHARGER ECHO 300

Etat de la batterie :



Batterie très faible



Batterie faible



Batterie pleine



En charge


Pour recharger : brancher le câble USB au chargeur et mini USB à echo 300, comme indiqué ci-dessous. Lorsqu'écho 300 est en charge, une LED verte clignote et reste fixe dès que le chargement est complet (minimum 4h).



L'appareil peut être rechargé à tout moment.

5 MENU PRINCIPAL

5.1 MENU PRINCIPAL

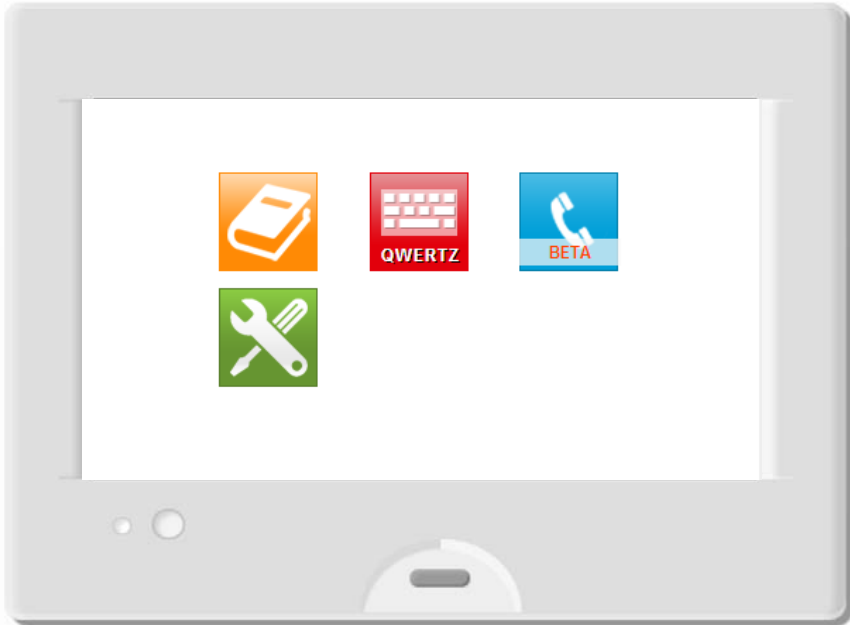

Le menu principal est composé par défaut de 3 icônes :

- Cahier de communication (icône orange)
- Clavier (icône rouge)
- Paramètres (icône verte)

+ *Suivant le paramétrage du menu, il est possible d'ajouter l'icône de la téléphonie et de supprimer les icônes du cahier de communication et du clavier.*

+ *Un appui bref sur le bouton central a la même action que la flèche retour, sauf sur le menu principal où il permet la mise en veille.*

5.2 ICONES DU MENU PRINCIPAL



Cahier de communication : le cahier de communication (élaboré grâce au logiciel gratuit CommBook¹) regroupe des icônes et/ou des scénarios de vie permettant de communiquer à partir d'images.



Détails et utilisation page 13



Clavier : le clavier permet de saisir un message pour le lire avec la synthèse vocale.



Détails et utilisation page 16



Téléphonie : cette partie propose un système permettant d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques. Il s'agit d'une version beta, c'est-à-dire que la version sera enrichie grâce aux remarques des utilisateurs d'écho 300.



Détails et utilisation page 19



Paramètres : la page des paramètres comporte deux niveaux :

- Un accès rapide au volume général, au choix de la langue et à la licence/version.
- Un accès à tous les autres paramètres.



Détails et utilisation page 23

¹ <http://www.commbook.org/>

6 CAHIER DE COMMUNICATION

6.1 PRESENTATION



Le cahier de communication comporte des icônes auxquelles sont attribuées des actions définies par l'utilisateur, pour une utilisation rapide de la synthèse vocale.

Corbeille :
supprimer le
contenu de la
zone de texte

Zone de texte :
afficher les textes
associés aux
icônes

Bouton de lecture :
lire le contenu de la
zone de texte avec la
synthèse vocale

Je veux aller au parc

Maison :
retourner au
menu principal

Flèche retour :
revenir à la
page
précédente

**Flèches haut
et bas** :
se déplacer
dans la page

6.2 GESTION DE LA CORBEILLE




En appuyant sur la **corbeille**, le contenu de la zone de texte sera envoyé dans la corbeille.



Pour récupérer le contenu de la corbeille, appuyez sur la corbeille pleine (image ci-contre). Le texte qu'elle contient sera ainsi réaffiché dans la zone de texte.

6.3 UTILISER LES ICONES POUR S'EXPRIMER

Composer le message en appuyant sur une ou plusieurs icônes pour afficher la phrase dans la zone de texte.

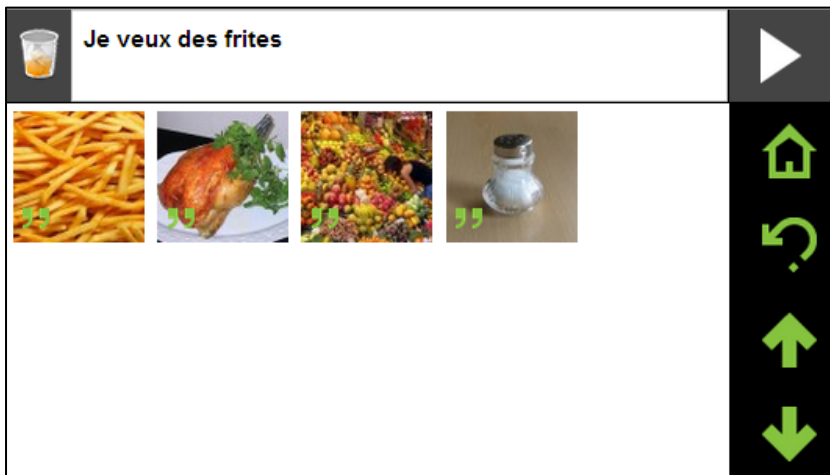

Le mode de lecture est paramétrable, voir page 25.

6.4 UTILISER UN SCENARIO DE VIE



Le **scénario de vie** est une suite chronologique d'icônes qui raconte une situation sociale (ex : aller à la piscine).

Appuyer sur la flèche « bas » pour passer à l'icône suivante et la flèche « haut » pour revenir à l'icône précédente.

7 CLAVIER


7.1 SAISIR UN MESSAGE



Composer le texte du message à l'aide du clavier.

The screenshot shows a virtual keyboard with a text input field at the top containing "tu veux aller au ciném|". The keyboard has several callout boxes pointing to specific features:

- Enregistrer une phrase**: Points to the "+" icon on the right side of the keyboard.
- Phrases déjà enregistrées**: Points to the list icon (three horizontal lines) on the right side of the keyboard.
- Avertisseur sonore**: Points to the bell icon on the right side of the keyboard.
- Retour au menu principal**: Points to the home icon (house) on the right side of the keyboard.
- Accès au clavier numérique / retour au clavier alphabétique**: Points to the "..." icon on the bottom left of the keyboard.
- Appuyer 1sec prononce « Attendez ! »**: Points to the "espace" key.
- Supprimer les caractères**: Points to the left arrow key.

 *Le mode de lecture et la suppression automatique des phrases après élocution sont paramétrables, voir page 25.*

Zone de texte : cliquer sur la zone de texte permet de zoomer la zone pour faciliter le positionnement précis du curseur, la sélection d'une partie du texte. Finaliser la saisie du texte en appuyant sur l'icône "flèche retour". (pour la version BETA)

A VENIR

7.2 ENREGISTRER UNE PHRASE



Saisir un texte à l'aide du clavier, puis cliquer sur l'icône « Enregistrer une phrase ».

	Je vais à Lyon demain, j'ai pris mon billet de train.	Remplacer
	Je prends le train de 18h32.	Remplacer
	J'ai rendez-vous avec Antoine.	Remplacer
	tu veux aller au ciné ?	Remplacer
	quelle heure est-il ?	Remplacer
	Maman m'a appelé tout à l'heure	Ajouter

La nouvelle phrase à enregistrer s'affiche en bas du tableau. Appuyer sur :



Pour enregistrer la phrase dans l'appareil.



Pour supprimer une phrase déjà enregistrée.




Pour remplacer une phrase déjà enregistrée par celle que vous venez de taper.




Si les modes « élocution automatique » et « effacement automatique après élocution » sont choisis, appuyer sur la corbeille pour pouvoir enregistrer votre phrase (page 25).

7.3 UTILISER UNE PHRASE DEJA ENREGISTREE

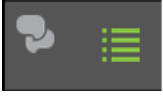


Sélectionner une phrase en appuyant sur l'icône « phrases enregistrées ».

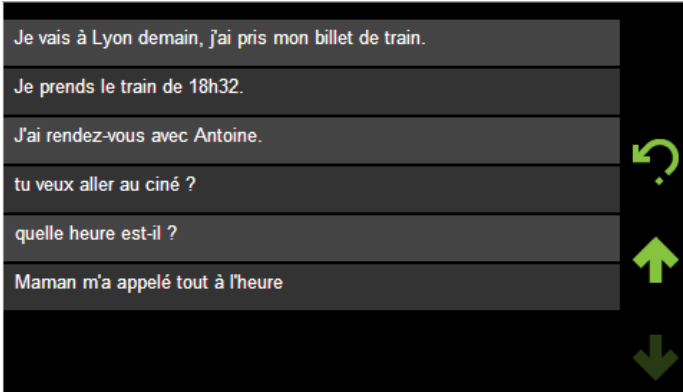

Dans la liste, appuyer sur la phrase de votre choix pour qu'elle s'affiche dans la zone de texte du clavier.

7.4 SYSTEME DE PREDICTION DE MOTS

A partir des 3 premières lettres saisies, le système vous propose les 4 mots les plus fréquents commençant par ces lettres, dans

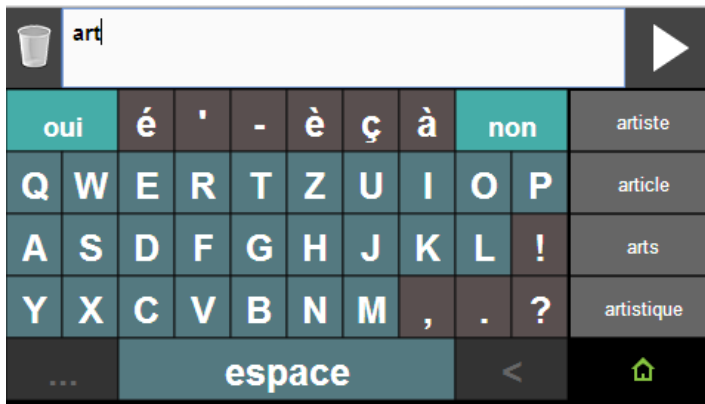

la langue sélectionnée pour la synthèse vocale.

Appuyer sur le mot de votre choix pour l'ajouter dans la zone de texte.

8 TELEPHONER AVEC ECHO 300 (VERSION BETA)

8.1 PRESENTATION




Avant d'utiliser la téléphonie, il faut insérer la carte SIM comme indiqué ci-dessous (SIM non fournie avec echo 300). Aller ensuite dans le menu « Paramètres », puis « Options », puis « Réseaux, WIFI » pour activer la téléphonie et entrer le code PIN fourni avec la carte SIM.

Revenir au menu principal pour accéder à la fonction téléphone.




Correct

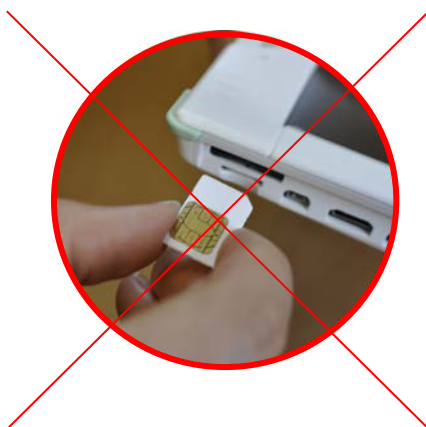

Incorrect


+ Comme dit précédemment « VERSION BETA » signifie que la version sera enrichie grâce aux remarques des utilisateurs d'echo 300. Vous êtes invités à nous signaler tout problème en contactant le service de support technique, voir page 37.

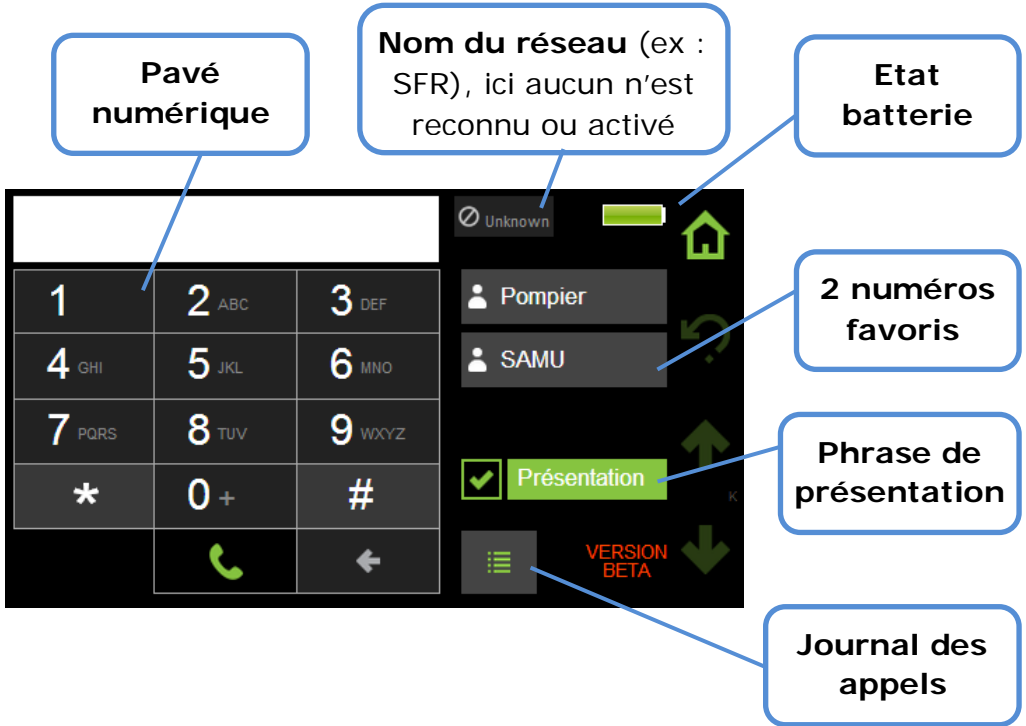

 Pour paramétrer les numéros favoris et la phrase de présentation, voir page 28

8.2 UTILISATION

8.2.1 Appeler avec echo 300

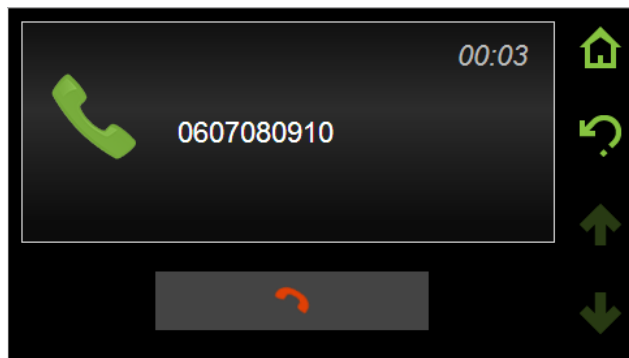

Composer le numéro et appuyer sur le téléphone vert. Une fois la connexion établie, la durée de l'appel s'affiche en haut à droite de l'écran.



Tant que vous n'avez pas appuyé sur le téléphone rouge pour raccrocher, vous pouvez naviguer librement dans les différents menus sans couper la communication.

8.2.2 Communiquer pendant un appel téléphonique



De retour sur le clavier, vous constatez que **la communication est bien en cours** par la présence du petit téléphone vert (voir ci-contre).

Comme pour l'utilisation classique du clavier, saisir le message et appuyer sur le bouton de lecture (si option lecture auto. non activée) pour que echo 300 prononce votre message à destination de votre interlocuteur.


8.2.3 Raccrocher



Vous pouvez **raccrocher** depuis le menu principal avec l'icône ci-contre. Sinon, raccrocher depuis la page téléphonie avec le téléphone rouge.

8.2.4 Recevoir un appel

Lorsqu'une personne vous appelle, l'écran suivant s'affiche.

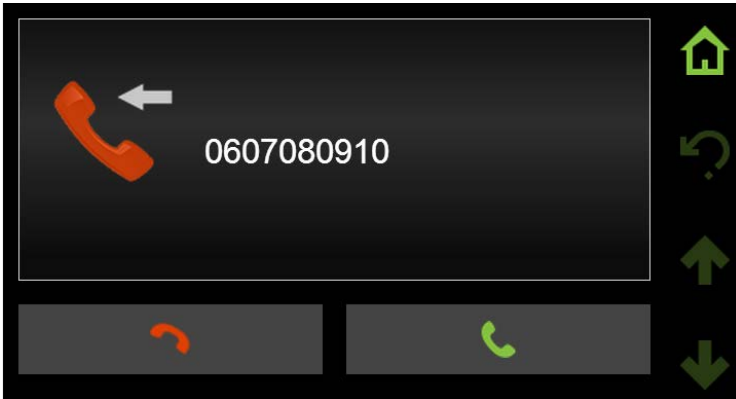

Vous pouvez alors décrocher avec le téléphone vert en bas à droite ou refuser l'appel en appuyant sur le téléphone rouge en bas à gauche.



Un appui bref sur le bouton central permet de ne pas tenir compte de l'appel entrant et continuer l'action en cours. Vous pourrez consulter plus tard le journal des appels.

9 PARAMETRAGE D'ECHO 300


9.1 CONFIGURATION SIMPLE



Appuyer sur l'icône verte « Paramètres » pour personnaliser votre echo 300.

Un premier niveau de réglage est disponible :


- la version d'echo 300 et les licences en appuyant sur le logo eROCCA
- le niveau de la batterie
- la langue de la synthèse vocale
- le volume.

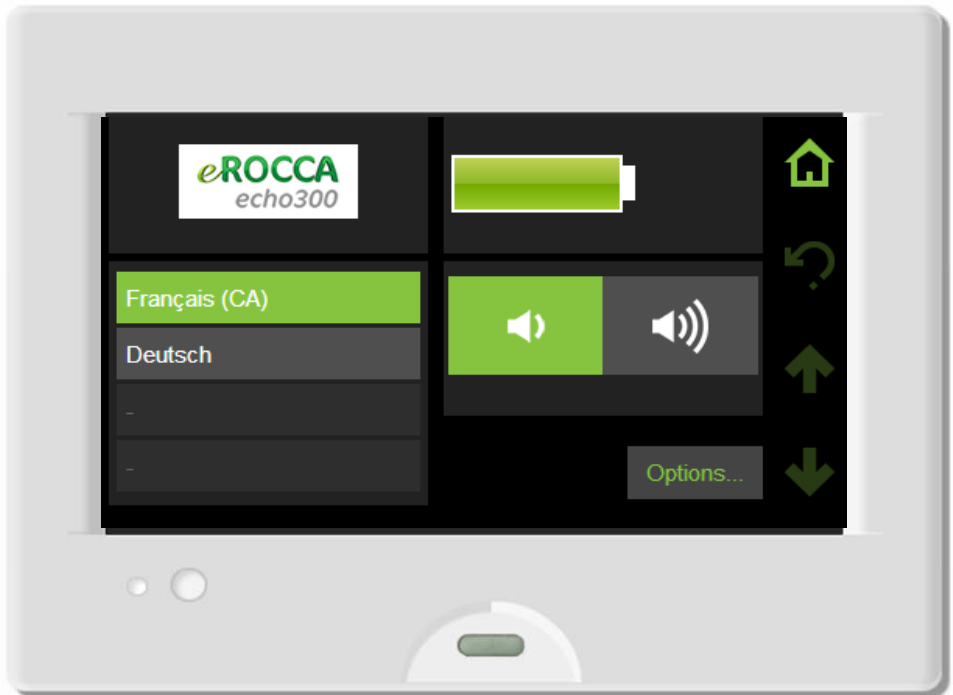

En appuyant sur **Options...** vous accédez à la **configuration avancée** pour plus de réglages (voir paragraphe suivant).

9.2 CONFIGURATION AVANCEE

Ce menu de configuration comporte 7 rubriques.

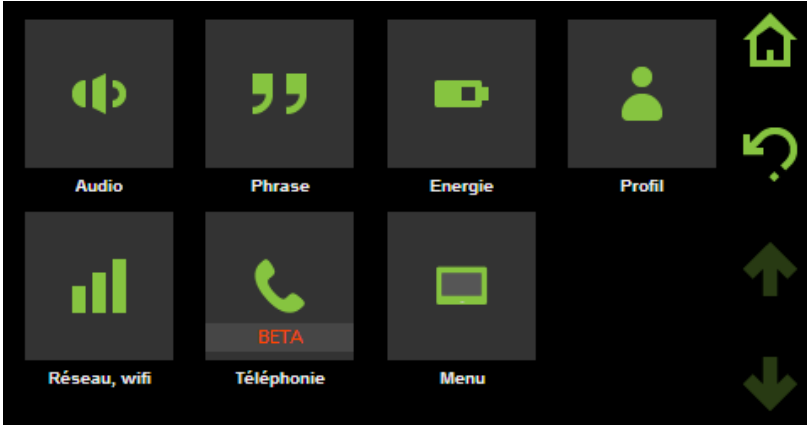


9.2.1 Audio


Cette page permet de paramétrer la synthèse vocale :

The image shows the 'Audio' configuration screen with several callout boxes pointing to specific features:

- Langue de la synthèse**: Points to the 'Français...' dropdown menu at the top left.
- Volume faible/fort**: Points to the speaker icon and the volume icon (two curved lines) at the top right.
- Ecouter les modifications**: Points to the play button (triangle in a circle) on the right side.
- Enregistrer les modifications**: Points to the save button (floppy disk icon) on the right side.
- Paramètres modifiables avec repères des valeurs initiales**: Points to the sliders for 'Vitesse', 'Timbre', and 'Volume'. A blue oval highlights the vertical tick marks on the 'Timbre' slider, which serve as initial value markers.

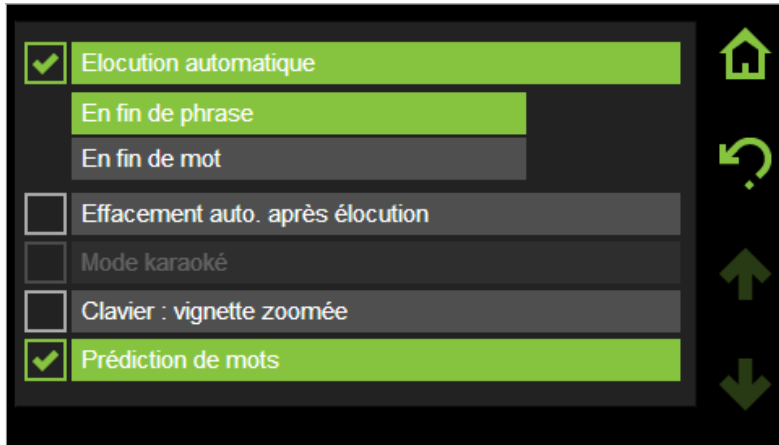


Le paramétrage de la phrase offre la possibilité de choisir :

- **Elocution automatique** : en faisant ce choix, la synthèse vocale prononce automatiquement le texte saisi au clavier soit à la fin d'un mot lorsqu'un espace est tapé, soit dès que vous entrez un signe de ponctuation (. ! ?).
- **Effacement automatique après élocution** : en cochant cette option, le contenu de la zone de texte s'efface dès qu'il a été prononcé par la synthèse vocale.
- **Mode karaoké** : permet d'avoir une coloration des mots dans la zone de texte lorsqu'ils sont prononcés. 
- **Zoom de la touche pressée** : affiche en plus gros la case que vous cliquez dans le clavier.
- **Prédiction de mots** : affiche sur la partie droite du clavier les mots les plus fréquents de la langue choisie commençant par les lettres que vous avez déjà tapées.

9.2.3 Energie

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran et les délais de mise en veille avec les \ominus et \oplus . Les changements sont immédiatement pris en compte.

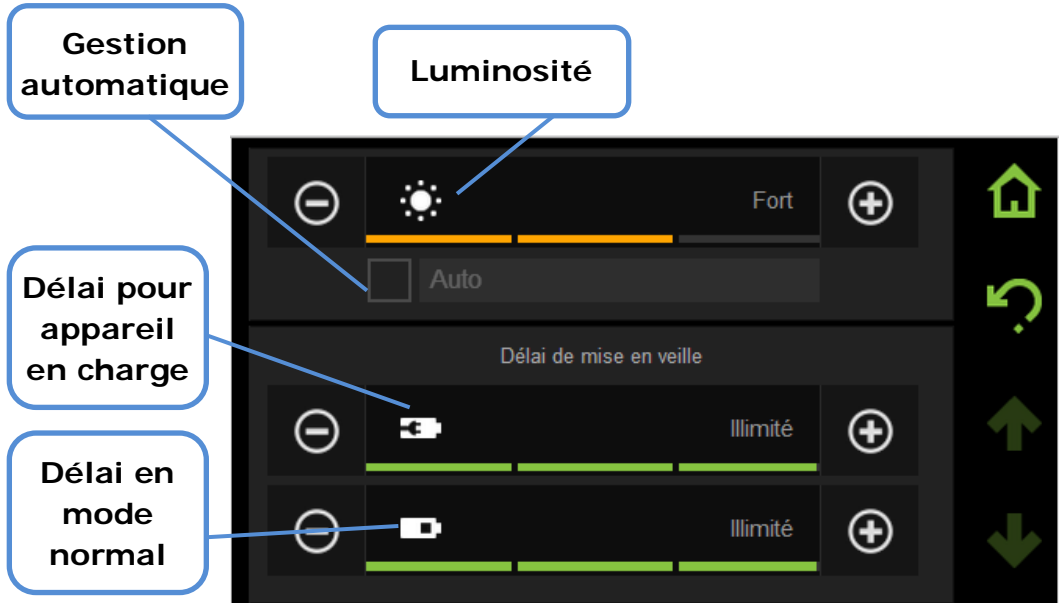


+ La case « Auto » pour la luminosité permet un réglage de la luminosité automatique grâce à un capteur de luminosité.



Les délais de mise en veille (durées non modifiables):

Court : 30 secondes
Moyen : 2 minutes
Long : 10 minutes
Illimité : ne se met jamais en veille, affiche un économiseur d'écran (fond animé de bulles vertes) au bout de quelques minutes.

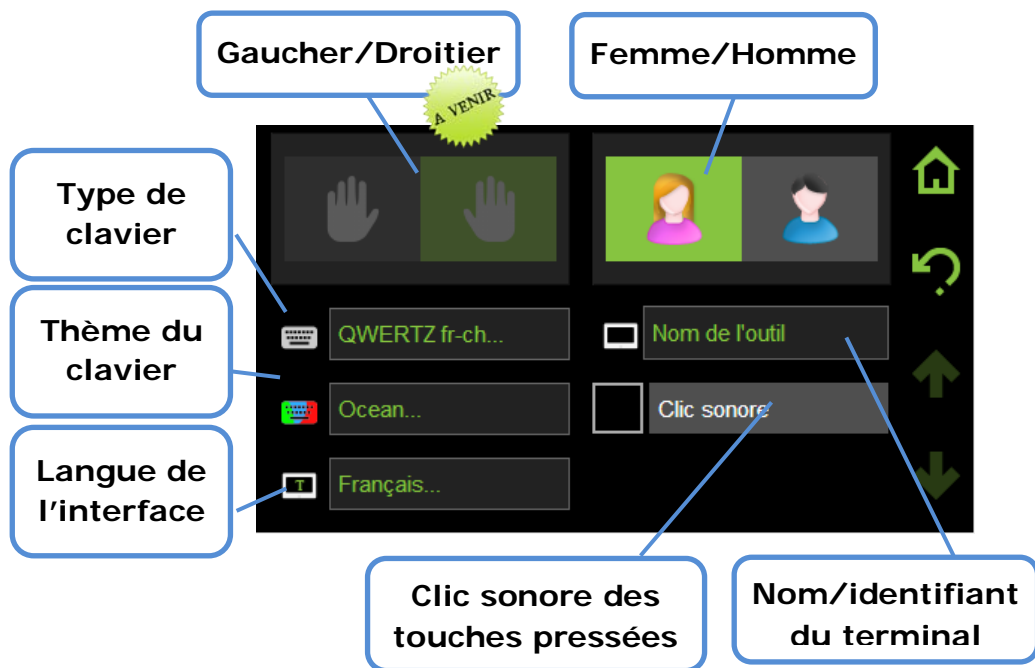

Les différents **types de claviers** proposent chacun un ordre des touches et/ou des caractères spécifiques (caractères accentués, symboles, ...).

Les **thèmes du clavier** proposent des couleurs pour le clavier.




Le **thème Visio** offre le plus fort contraste pour une meilleure lisibilité.



Le bouton « **Nom de l'outil** » peut également vous permettre de visualiser les modifications de clavier ci-dessus.

9.2.5 Réseau, WIFI

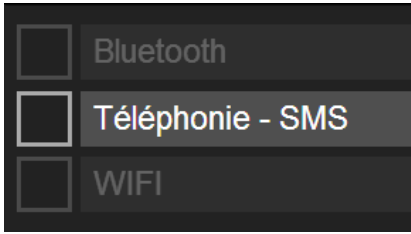

Activer/désactiver le réseau pour le téléphone.

Le **Bluetooth** et le **WIFI** :




9.2.6 Téléphonie - version

BETA

2 numéros favoris (ici : Pompier, SAMU)

Phrase de présentation

Mode avion

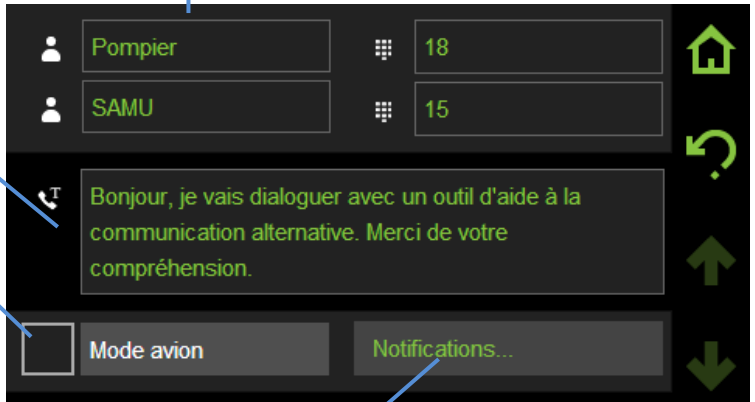

Choix des alertes sonores

Nous conseillons de préparer une **phrase de présentation** qui permet de prévenir votre interlocuteur que vous parlez au téléphone avec une synthèse vocale.




Lorsque vous cochez le **mode avion**, ce logo apparaît dans le menu principal.



Cette option est grisée si aucun réseau n'est activé.

9.2.7 Menu

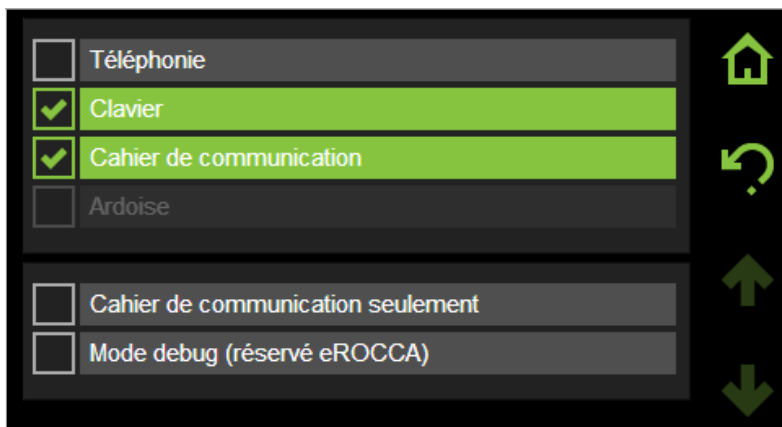


Dans les paramètres du menu, on peut choisir les **icônes présents dans le menu principal** :

- Téléphonie
- Clavier
- Cahier de communication
- Ardoise : reconnaissance de l'écriture manuscrite et dessin



En cochant « **Cahier de communication seulement** », vous n'avez plus directement accès au menu principal. Pour sortir de ce mode, appuyer 3 secondes sur le bouton central et choisir « **OPTIONS** » pour **désactiver** le mode « Cahier de communication seulement », et revenir au premier niveau de réglage.

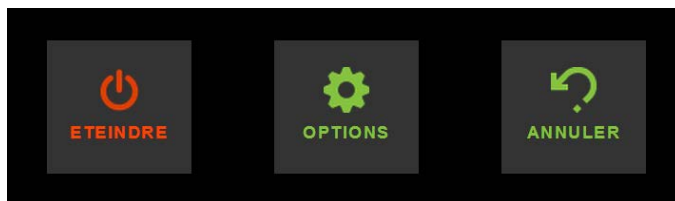

Le « **Mode debug (réservé eROCCA)** » est seulement utilisé par les techniciens en cas de panne.

10 MISE EN GARDE/AVERTISSEMENTS

Certaines des technologies ci-dessus peuvent ne pas être activées en fonction de la version de votre logiciel. Se référer aux détails d'utilisation décrits dans ce document pour plus de précision.

L'utilisation d'une carte SIM de l'opérateur de votre choix est à vos frais.

CABLES ET ACCESSOIRES

Câbles et accessoires eROCCA

Les câbles et accessoires fournis par eROCCA avec echo 300 sont étudiés pour vous apporter le maximum de confort et de sécurité dans l'utilisation quotidienne de votre echo 300.

Si vous utilisez des câbles ou accessoires non fournis par nous, eROCCA ne garantit pas le fonctionnement correct de votre echo 300.

eROCCA maintient un stock de câbles et accessoires à votre disposition dont vous trouverez le détail sur notre site Internet ou auprès de votre revendeur agréé.

Avant d'utiliser tout produit ou accessoire fourni par un tiers avec echo 300, consultez l'ensemble des consignes de sécurité le concernant. eROCCA n'est responsable ni du fonctionnement d'accessoires tiers, ni de leur conformité aux normes de réglementation et de sécurité.

Connexions

N'essayez jamais d'insérer un connecteur de force dans un port, car cela risque de provoquer des dommages, non couverts par la garantie.

Si le connecteur et le port ne s'assemblent pas facilement, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas compatibles.

Vérifiez le bon état du port, assurez-vous que le connecteur corresponde au port et que vous avez correctement positionné le connecteur par rapport au port.

Communication sans fil

L'activation du mode Avion sur echo 300 peut éliminer des interférences audio entre echo 300 et un accessoire. Dans ce mode, vous ne pouvez pas utiliser les facultés GSM (appels voix et messages courts) d'écho 300, ni utiliser les fonctions basées sur une communication sans fil.

Dans certaines conditions, certains accessoires peuvent altérer les performances sans fil d'écho 300. Celles-ci peuvent éventuellement être améliorées par la réorientation ou le déplacement d'écho 300 et de l'accessoire connecté.

11 GARANTIE

echo 300 est normalement garanti un an en standard, pièces et main d'œuvre.

Le démontage (et tentative de démontage ?) d'echo 300 annule la garantie.

PRECAUTIONS D'UTILISATION ET RECYCLAGE

Précautions d'utilisation

ATTENTION : le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres dommages corporels et endommager echo 300 ou d'autres biens.

echo 300 n'est pas conçu pour être utilisé pour des applications où la survie et/ou la sécurité des utilisateurs est lié à son fonctionnement correct. eROCCA décline toute responsabilité sur les conséquences de l'utilisation d'echo 300 dans de telles conditions.

Transport et manipulation d'echo 300

echo 300 contient des composants fragiles. Évitez de laisser tomber votre echo 300, de le démonter, de le chauffer au four à micro-ondes, de le brûler, de l'immerger, de le peindre ou d'y insérer des corps étrangers.

Si votre echo 300 présente des dommages apparents tels que des fissures, des trous ou si un liquide a pu rentrer à l'intérieur, ne l'utilisez plus avant de l'avoir apporté à un Centre de services agréé eROCCA. La réparation ne doit être réalisée que par un Centre de services agréé eROCCA. Pour toute question, contactez eROCCA ou un Centre de services agréé eROCCA.

N'essayez jamais de réparer ou de modifier echo 300 vous-même. Etant donné sa haute technicité, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Température

echo 300 est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0 et 45°C et un stockage à des températures comprises entre -20 et 55 °C.

Des températures trop élevées ou trop basses peuvent réduire temporairement la durée de vie de la batterie ou provoquer un arrêt momentané du fonctionnement d'echo 300.

Ne laissez pas echo 300 dans une voiture en stationnement ou exposé à la lumière du soleil, sinon la température pourrait dépasser la plage de températures de stockage ou de fonctionnement.

Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation d'echo 300, en effet de la condensation peut se former sur echo 300 ou à l'intérieur.

Lorsque vous utilisez echo 300 ou rechargez sa batterie, sa température extérieure peut augmenter puisque echo 300 utilise la surface du boîtier pour refroidir sa température intérieure.

Appels d'urgence

Ne dépendez pas des dispositifs sans fil pour des communications essentielles, notamment relatives aux urgences médicales.

L'utilisation de echo 300 pour appeler les services d'urgence peut ne pas fonctionner partout ou dans toutes les conditions d'utilisation.

Les numéros et services d'urgence varient par pays, et il arrive qu'un appel d'urgence ne puisse être initié en raison de l'indisponibilité du réseau, d'interférences dues à l'environnement ou à des règles spécifiques du fournisseur de réseau.

Interférence radio

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements.

Bien qu'écho 300 ait été conçu, testé et fabriqué pour respecter les réglementations sur les émissions de radiofréquence dans les pays où il est commercialisé tels que les États de l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, les émetteurs sans fil et circuits électroniques d'écho 300 peuvent provoquer des interférences avec d'autres équipements électroniques.

Nous vous recommandons donc de prendre les précautions suivantes :

- Avion : L'utilisation d'écho 300 peut être interdite dans les avions. Utilisez le mode avion ou éteignez echo 300.
- Si vous avez des raisons de suspecter l'existence d'interférences, éteignez immédiatement echo 300.

Exposition énergétique radio

echo 300, utilisé en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth), est soumis aux précautions d'usages standards spécifiques à chaque lieu.

De manière générale, les précautions d'usage de l'appareil lorsqu'il n'est pas en mode avion sont :

- o Implants électroniques: les fabricants et les professionnels du secteur de la santé recommandent d'éviter de porter ou d'approcher un terminal radioélectrique à moins de 15-25 cm de la région de l'implant électronique, afin d'éviter tout risque d'interférences avec ce dernier.
- o echo 300 ne doit pas être utilisé en conduisant.
- o Dans certains lieux, il est nécessaire de commuter le mode avion (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).

Aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'a encore été constaté. Mais si vous désirez réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements radio, voici quelques conseils pour l'utilisation d'écho 300 en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth) :

- L'utilisation d'écho 300 doit se faire dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnements reçus (éviter notamment l'utilisation du GSM dans des parkings souterrains ou lors de déplacements en train ou en voiture.).
- Les paramètres de bonne réception sont disponibles sur l'écran principal lorsque la téléphonie mobile est activée.
- echo 300 en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth) doit être éloigné du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents (20cm minimum).

Issu de « Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications »

Atmosphères explosives

Éteignez votre echo 300 avant de pénétrer dans une zone où l'atmosphère est potentiellement explosive. Ne rechargez pas votre echo 300 dans une telle zone.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont par exemple : les stations-services, des zones d'installations de stockage, ou de transfert de produits chimiques ou combustibles, ou toute autre zone dans laquelle il est demandé d'éteindre le moteur de son véhicule.

Nettoyage de l'extérieur echo 300

Nettoyez immédiatement echo 300 s'il entre en contact avec un produit susceptible de provoquer des taches — (encre, colorant, maquillage, saletés, aliments, liquides huileux).

Pour nettoyer echo 300, débranchez les câbles et accessoires et éteignez-le (appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes). Utilisez ensuite un chiffon doux, légèrement humide.

Veillez bien à ne pas introduire de liquide par les prises du côté.

Ne pas utiliser de produits courants de nettoyage ménager (ex : Javel, ammoniac, produits pour vitres, alcool, etc.) pour nettoyer echo 300.

Les dégâts causés à echo 300 par contact avec un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

Batterie d'echo 300



Votre echo 300 est équipé d'une batterie Lithium-Ion longue durée de grande capacité spécifique à eROCCA.

Il est interdit de tenter de changer la batterie par ses propres moyens. Le changement de la batterie ne doit être fait que par eROCCA ou par une entreprise agréementée par eROCCA (vérifiez auprès d'eROCCA ou sur notre site Internet).

Il est interdit et dangereux de remplacer la batterie d'echo 300 par toute autre batterie. Un changement de type ou modèle de batterie d'echo 300 ne peut se faire que par eROCCA avec des changements logiciels associés.

Recharge de la batterie

Pour recharger echo 300, utilisez uniquement le câble USB fourni par eROCCA avec :

- un adaptateur secteur fourni par eROCCA ;
- un autre appareil ou accessoire eROCCA conçu pour fonctionner avec echo 300 ;
- le port USB haute puissance d'un autre appareil conforme à la norme USB 2.0 ou 1.1

Il se peut que l'adaptateur secteur USB eROCCA chauffe pendant une utilisation normale. Veuillez à toujours assurer une ventilation correcte autour de lui et à toujours le manipuler avec précaution.

Débranchez impérativement l'adaptateur secteur USB eROCCA dans les cas suivants :

- Le câble d'alimentation ou la prise est endommagé.
- L'adaptateur est exposé à des projections de liquides ou à une humidité excessive.
- Le boîtier de l'adaptateur est endommagé.
- Vous pensez que l'adaptateur doit être réparé.
- Vous voulez nettoyer l'adaptateur.

Mise au rebut et recyclage d'écho 300 et des accessoires (Union Européenne)

Dans le cadre de l'application du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets de ces équipements, il vous est interdit de jeter votre echo 300 et ses accessoires électroniques à la poubelle.



Ce symbole signifie que conformément aux lois et règlements français, votre produit et sa batterie ne peuvent pas être recyclés avec les déchets ménagers.

Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour le recyclage d'équipement électronique ou remettez le à votre distributeur (eROCCA ou un de ses partenaires). Notez que la mise au rebut incorrecte d'équipement électronique par le consommateur peut être punie par des amendes.

La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la mise au rebut aidera à économiser les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

LOGOS ET MARQUES

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. eROCCA n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possibles. eROCCA n'est pas responsable des erreurs d'impression ou de frappe.

12 SUPPORT ET ECHANGE AVEC EROCCA

L'équipe eROCCA reste à votre disposition pour toute question sur les produits vendus par eROCCA. Nous vous répondons dans les 24h par :

Téléphone : 04 50 36 07 11

Fax : 04 50 36 72 40

e-mail : support@erocca.com

La société eROCCA, basée en Rhône-Alpes, conçoit, développe et commercialise ses produits. En tant qu'utilisateur de nos produits, vous êtes nos meilleures sources d'inspiration. Aussi nous sommes preneurs de toutes idées ou suggestions qui pourraient nous aider à améliorer votre quotidien.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et restons à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe eROCCA
www.erocca.com